



makervsvirus.org

**Liebe Helfende, Pflegende,  
Mediziner/innen... liebe Helden/  
Heldinnen!**


In diesem Paket erhaltet ihr 3D-gedruckte Gesichtsschilde. Die Teile wurden auf eure Anfrage hin hergestellt und wir hoffen, wir können euch damit helfen. Wir alle danken euch für eure wichtige Arbeit. Wir wünschen euch viel Kraft und Gesundheit!

Euer MakerVsVirus-Team  
makervsvirus.org


**Bitte unbedingt beachten!**  
**Behelfsmäßige** persönliche Ausrüstung ohne zugesagte Schutzfunktion, **NICHT** getestet, **NICHT** zertifiziert. **Keine Haftung bzw. Gewährleistung.** Verwendung nach sorgfältiger Prüfung nach eigenem Ermessen. Die Halter sowie die Visiere sind **NICHT** desinfiziert und **wir können nicht ausschließen, dass diese durch uns kontaminiert wurden.**

## Zusammenbau


Video unter: <https://bit.ly/2JwwJdy>

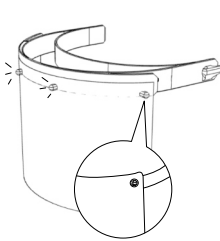

**1**  
Folie in Halter einsetzen

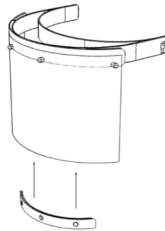

**2**  
Optionale untere  
Verstärkung anstecken

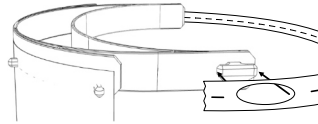

**3**  
Lochgummi anbringen

## Desinfektion

Nicht über 60°C erhitzen, keine Spülmaschine. Kein Ethylenoxid oder scharfe Mittel benutzen. Bei PVC und PLA getestet sind:

- Wofasteril mit Alcapur als Base, 0.5%ige Lösung
- Sterilium (hinterlässt einen abwischbaren Film)
- Schülke Desderman pure (Ethanol / Biphenyl)
- Schülke Desmanol N ( 1-Propanol, 2-Propanol, Milchsäure)
- Schülke Terralin 0,5%

Maske Hergestellt aus: <input type="checkbox"/> PLA <input type="checkbox"/> PETG <input type="checkbox"/> PET <input type="checkbox"/> ABS	Datum:	Hilfe / Infos: 
	Herstellungs-Hub:	